



# MANUAL VH EQUIPAMENTOS

## SONIC



### **VH Equipamentos LTDA.**

Av. Otto Niemeyer, 185 CEP:91910-000 Porto Alegre RS Brasil

CNPJ:26.424.479/0001-87 IE:096.368.2822

Telefone: (47) 98830 3564

E-mail: [contato@vhequipamentos.com.br](mailto:contato@vhequipamentos.com.br)

[www.vhequipamentos.com.br](http://www.vhequipamentos.com.br)

## **AVISO IMPORTANTE!**

A Vet Health Equipamentos e a Mundo à Parte não se responsabilizam pelo uso incorreto dos equipamentos, em desacordo com as orientações prestadas neste Manual de Instruções, tampouco se comprometem com a total eficiência dos resultados pretendidos com o uso do equipamento.

O equipamento descrito neste manual, voltado à fisioterapia veterinária aliada ao uso da tecnologia, conhecimento e praticidade, tem o objetivo de auxiliar no tratamento fisioterapêutico de seu animal, mas não garante obrigatoriamente o resultado almejado, podendo depender de outros fatores alheios à utilização do equipamento.

Atente-se às instruções contidas neste Manual, pois a VH Equipamentos e a Mundo a Parte não serão responsáveis pelo uso inadequado do equipamento, que poderá causar potencial perigo à saúde de seu animal. Por favor, quaisquer dúvidas na preparação, adequação e utilização do equipamento, favor entrar em contato conosco nos meios disponibilizados em nosso website:

*<https://vhequipamentos.com.br/fale-conosco/>*

# ÍNDICE

<b>1. APRESENTAÇÃO</b>	4
1.1 Prezado cliente	4
1.2 O manual	4
1.3 Equipamento Sonic	5
<b>2 CUIDADOS NECESSÁRIOS COM O SONIC</b>	5
2.1 Cuidados técnicos	5
2.2 Cuidados com a limpeza	6
2.3 Cuidados com o armazenamento	7
2.4 Cuidados com o transporte	7
<b>3 ITENS DO EQUIPAMENTO PHOTUM</b>	8
<b>4 INDICAÇÕES</b>	10
<b>5 CONTRAINDICAÇÕES</b>	10
<b>6 VISÕES</b>	11
6.1 Visão frontal	11
6.2 Visão frontal	11
<b>7 MODO DE UTILIZAÇÃO</b>	12

## 1. APRESENTAÇÃO

### 1.1 Prezado cliente

Parabéns por adquirir um equipamento de ótima qualidade e tecnologia, que associado a seus conhecimentos desempenharão excelentes resultados em seu trabalho.

Para aproveitar ao máximo dos recursos do equipamento com segurança é fundamental que leia este manual antes do primeiro uso e siga corretamente as instruções descritas. Assim, você estará preparado para exercer o seu trabalho de forma profissional proporcionando excelência nos atendimentos.

A equipe VH Equipamentos está pronta para esclarecer qualquer dúvida quanto ao funcionamento do equipamento, bem como receber críticas e sugestões de melhorias.

SAC

Telefone: (47) 98830 3564

E-mail: [contato@vhequipamentos.com.br](mailto:contato@vhequipamentos.com.br)

### 1.2 O manual

O manual relata os processos de montagem, instalação e as especificações técnicas do equipamento SONIC.

Este manual contém as especificações necessárias para o seu uso de forma correta e segura. Ele foi elaborado por profissionais veterinários especializados com excelentes qualificações para o seu desenvolvimento.

### 1.3 Equipamento Sonic

O SONIC foi desenvolvido por médicos veterinários especializados na área de fisioterapia e, portanto, projetados para conferir maior praticidade ao terapeuta e conforto ao paciente durante o tratamento.

É um equipamento de emissor de ondas sonoras de baixa frequência. Tem como objetivo promover o relaxamento muscular e favorecer o alongamento de tendões. Não é necessário tosar o animal para que o equipamento faça a ação necessária.

A sua frequência possui variação a cada 1 hertz iniciando em 5 e terminando em 12 Hz.

A intensidade varia de 1 a 9 em ordem crescente emissão de ondas sonoras.

O tempo varia de 1 a 99 minutos.

Com produção 100% nacional, a VH Equipamentos garante eficiência na aquisição dos produtos e assistência técnica rápida e personalizada.

## 2 CUIDADOS NECESSÁRIOS COM O SONIC

### 2.1 Cuidados técnicos

Antes de ligar seu Sonic certifica-se que o equipamento esteja seco e com nenhum dado aparente.

Não abra o equipamento, pois, além de perder a garantia, você estará pondo em risco a sua segurança. Qualquer problema ou defeito, entre em contato com a VH Equipamentos que dará total suporte para a solução de danos.

Não desconecte o plug da tomada puxando pelo cabo de força.

Não coloque o equipamento de forma empilhada com outros equipamentos ou objetos.

Recomenda-se segurar as bobinas pela parte mais pesada, evitando dano ao fio condutor;



Para guardar os aplicadores, recomenda-se enrolar os cabos, sem que os mesmos sejam dobrados ao meio ou pendurá-los utilizando o elástico em ganchos;



## 2.2 Cuidados com a limpeza

Para correta higiene do equipamentos, recomenda-se um pano úmido em álcool ou água.

Para correta limpeza do tecido dos aplicadores, utilize um pano levemente úmido com detergente neutro apenas na face posterior e após, deixe secar naturalmente.

### 2.3 Cuidados com o armazenamento

Não guarde o seu equipamento em locais sujos e úmidos.

Não armazene seu equipamento em ambientes com temperatura superior a 50° ou inferior a -15°C.

Não coloque o seu equipamento exposto aos raios de sol ou chuva.

### 2.4 Cuidados com o transporte

Caso precise transportar o seu equipamento, utilize a bolsa de transporte da VH Equipamentos que foi produzida da forma que suporta e encaixa perfeitamente o equipamento. Assim, você garante a integridade do equipamento.

### 3 ITENS DO EQUIPAMENTO PHOTUM

- 1 Cabo de Força:



- 1 Equipamento Sonic:



- 4 Aplicadores





- 4 Elásticos com fivelas:



- 1 Bolsa de transporte



## **4 INDICAÇÕES**


A utilização do equipamento Sonic deve ser feito por um médico veterinário especializado para os tratamentos de contraturas musculares e encurtamento de tendões.

## **5 CONTRAINDICAÇÕES**

A utilização do equipamento Sonic não é indicado para pacientes portadores de marca-passo e cardiopatas.

## 6 VISÕES

### 6.1 Visão frontal

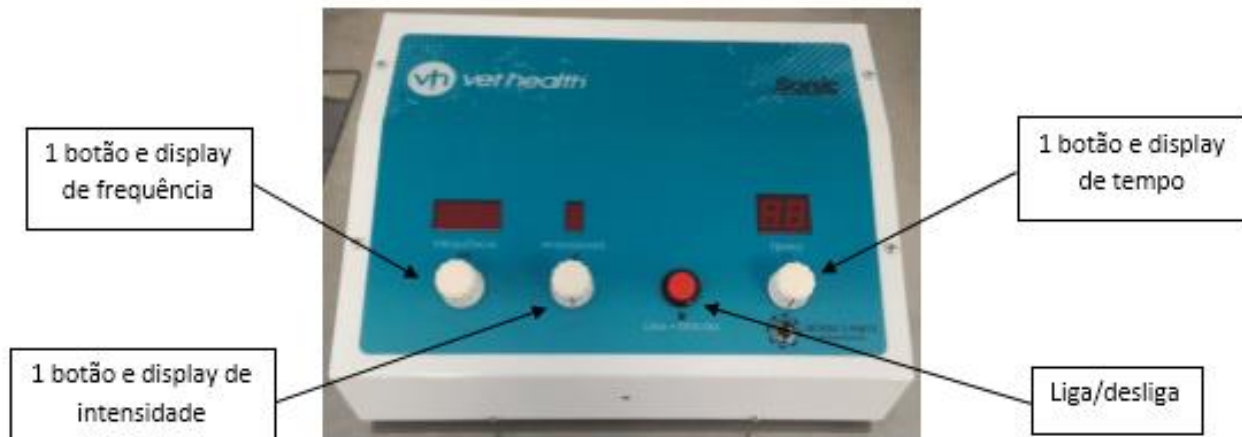

### 6.2 Visão frontal



## 7 MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Conecte o cabo de energia (com pressão, evitando o mal contato) e os aplicadores que serão utilizados;

2. Ligue a chave geral;

3. Selecione os parâmetros conforme protocolo terapêutico estabelecido, girando os botões no sentido horário;

4. Ligue as chaves individuais dos aplicadores que serão utilizados, mantendo-as para cima quando ligadas;

5. O aparelho já está pronto para a utilização. Aperte o botão liga/desliga da parte frontal do equipamento.

Quando terminar o tempo um bip sonoro será emitido;

6. Ao finalizar o tratamento, desligue a chave geral do equipamento e desconecte os cabos com delicadeza, se for necessário transportar o equipamento.